


Návod na použití rektální rourky Riocath®

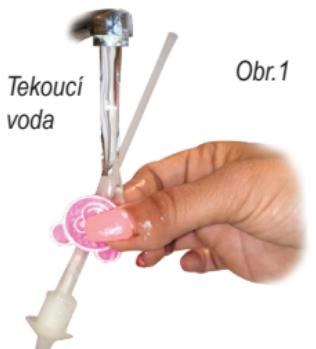

Rektální rourka Riocath® slouží k odvodu plynu z tlustého střeva konečníkem.

1. Po vyjmutí z obalu uchopte rektální rourku Riocath® za hlavu medvídka (3) tak, aby ouška medvídka směrovala směrem dolů. (hlava medvídka je vzhůru nohami).

2. V této poloze dejte rektální rourku pod tekoucí vodu tak, aby voda natekla do mezery mezi silnější (2) a tenčí (4) trubičkou, těsně pod hlavou medvídka. (viz Obr.1)

3. Poté uchopte jednou rukou hlavu medvídka (3) a druhou rukou tenčí (pohyblivou) trubičku (4) s rozšířeným koncem. Trubičku několikrát zatlačte a opět vytáhněte. (viz Obr.2)
Zasouvání a vysouvání musí jít lehce.

4. Kojence položte na záda, před samotným zavedením rektální rourky namasírujte krátké bříško.

5. Rektální rourku Riocath® uchopte do ruky, přičemž palec je opřený o rozšířený konec tenčí (pohyblivé) trubičky (4) a ukazovák s prostředníkem se opírají o ouška hlavy medvídka. (viz Obr.3)

6. Nožičky kojence držte jednou rukou nahoru a druhou rukou přiložte rektální rourku zavaděčem ke konečníku. Pomalým stiskem palce zavedete trubičku do konečníku. Nemusíte se starat o to, jak hluboko má být výsuvná část zavedena, vysouvá se v délce maximálně 2,5 cm, což je jedna z významných vlastností naší rektální rourky Riocath®.

7. Po zavedení vyčkejte až nahromaděný plyn kojenc vytlačí skrze trubičku.

8. Poté uchopte jednou rukou rektální rourku za hlavu medvídka (3) a druhou rukou vytáhněte tenčí (pohyblivou) trubičku (4) zpět do původní polohy.

Skladujte na suchém, chladném a temném místě.